

# ¿CÓMO DEBO DESINFECTAR MI ESCUDO DE PROTECCIÓN FACIAL?



## Desinfección preventiva (uso diario):

Rociar el escudo con una solución de una cucharada de lejía por cada litro de agua.

También pueden lavarse con **agua y jabón, detergente o rociarlos con alcohol al 70%.**

**AL REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN UTILIZA SIEMPRE GANTES Y MASCARILLA**

Normas Libres – EDP 101:2020 ESCUDO DE PROTECCIÓN FACIAL PARA REDUCCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO. Especificaciones técnicas – Inacal



Los escudos se usan como complemento a las mascarillas, respiradores y lentes.  
**No los reemplazan.**



PERÚ

Ministerio  
de la Producción



**INACAL**  
Instituto Nacional  
de Calidad

# ¿CÓMO DEBO DESINFECTAR MI ESCUDO DE PROTECCIÓN FACIAL?



Si has tenido contacto o si has estado en lugares de riesgo como hospitales:

Sumergir el escudo por 10 minutos en recipiente con **solución de 5 cucharadas de lejía por cada litro de agua.** Enjuagar con abundante agua.

**AL REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN UTILIZA SIEMPRE GANTES Y MASCARILLA**

Normas Libres – EDP 101:2020 ESCUDO DE PROTECCIÓN FACIAL PARA REDUCCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO. Especificaciones técnicas – Inacal



Los escudos se usan como complemento a las mascarillas, respiradores y lentes.  
**No los reemplazan.**



PERÚ

Ministerio  
de la Producción



**INACAL**  
Instituto Nacional  
de Calidad